

Safe Ear Curettes™

Le Bionix® Safe Ear Curettes consentono agli operatori sanitari di rimuovere in modo sicuro e delicato il cerume con modelli che si adattano ai diversi tipi di cerume e alle preferenze personali.



PROBLEMA

Le curette dure e rigide in acciaio inossidabile non causano solo dolore e disagio ai pazienti, ma possono anche danneggiare facilmente il condotto uditivo e la membrana timpanica.

SOLUZIONE

Le Bionix Safe Ear Curettes sono flessibili, per ridurre le lesioni al condotto uditivo, rendendole più sicure rispetto alle curette in acciaio inossidabile.

RISULTATI

Sette modelli di puntali codificati a colori per soddisfare esigenze specifiche, offrendo "lo strumento giusto per qualsiasi lavoro" per ogni situazione di cerume.

"Uso le curette auricolari Bionix fin dall'internato. Per me sono lo standard di riferimento." - Dr. Sidney Shah

EVENTUALE RIMBORSO (SOLO USA)

Codice CPT/Descrizione

69210 - Per l'eventuale rimborso del cerume compattato.



Rx ONLY

MADE IN THE U.S.A.



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Bruxelles, BELGIO
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 5154 Enterprise Blvd, Toledo, OH, 43612, U.S.A.
Telefono: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0045-IT | Rev. A

Safe Ear Currettes™

OFFERTA DI PRODOTTI

ADULTI

CeraSpoon® giallo | N. 6333
Il CeraSpoon giallo è perfetto per il cerume più morbido, soprattutto nei pazienti che producono quantità eccessive di cerume. **4 mm**

ControLoop® arancione | N. 2999
Il ControLoop arancione ha un puntale piegato in stile "Shapleigh" che permette di estrarre il cerume direttamente dal condotto uditivo. **4 mm**

AngleLoop® rosso | N. 3444
L'AngleLoop rosso ha un puntale angolato che facilita il raggiungimento del cerume duro e difficile da raggiungere, comune nei pazienti più anziani. **4 mm**

GENERALE

FlexLoop® bianco | N. 9555
Il FlexLoop bianco è una curretta multiuso progettata per il normale curettage in vari pazienti. **4 mm**

GIOVANI

VersaLoop® viola | N. 4111
Il VersaLoop viola ha un puntale morbido e flessibile che dà all'utente un controllo eccezionale, offrendo nel contempo al paziente un maggiore comfort. **3 mm**

InfantScoop® blu | N. 4888
L'InfantScoop blu è progettato per le orecchie più piccole e può essere utilizzato attraverso un otoscopio. **2 mm**

MicroLoop® verde | N. 1222
Il MicroLoop verde è più rigido nella struttura ed è progettato per rimuovere il cerume duro e compatto. **3 mm**

ISTRUZIONI PER L'USO



CURETTAGE NORMALE

1. Utilizzare l'otoscopio per determinare la posizione del cerume.
2. Scegliere una curretta appropriata per il tipo di paziente e di cerume.
3. Inserire la curretta nel condotto uditivo e rimuovere il cerume.
4. Ripetere l'esame otoscopico e determinare la posizione del cerume restante.



CURETTAGE CON OTOSCOPIO

1. Utilizzare l'otoscopio per determinare la posizione del cerume.
2. Scegliere una delle Youth Safe Ear Currettes™.
3. Far scorrere l'ingrandimento con l'otoscopio su un lato.
4. Inserire la curretta attraverso l'otoscopio e rimuovere il cerume.

"La varietà di dimensioni e di forme dei puntali rende la rimozione del cerume più facile che mai." - Dr. Carl A. Moritz, Jr.

BIONIX®, CeraSpoon®, FlexLoop®, InfantScoop®, MicroLoop®, AngleLoop®, VersaLoop® e ControLoop® sono marchi registrati. Safe Ear Currettes è un marchio di fabbrica di BIONIX.

Brevettati: ControLoop, CeraSpoon, VersaLoop, FlexLoop, InfantScoop e AngleLoop.



SOLUZIONI INNOVATIVE PER I PROBLEMI DI OGNI GIORNO

+1 800.551.7096 • www.bionix.com